

Darmpessar ANO von Junker®

für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Darmpessars beginnen. Bei Fragen oder Problemen in der Anwendung wenden Sie sich bitte an den Hersteller (siehe unten).

Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und auch kein Heilmittel. Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Inhalt

1. Was ist der Darmpessar und wofür wird er angewendet?
2. Wie ist der Darmpessar anzuwenden?
3. Wie ist der Darmpessar zu reinigen?
4. Nebenwirkungen
5. Packungsinhalt und weitere Informationen
6. Kontaktdaten

1. Was ist der Darmpessar und wofür wird er angewendet?

Der Darmpessar ANO von Junker® ist ein ergonomisch geformtes Kunststoffröhrchen mit einem Gewicht von ca. 5 g und einer Länge von 8 cm. Eingeführt in den After lässt er Blähungen des gesamten Darmtraktes abfließen. Bei längerer Verwendung geschieht der Gasaustritt fein dosiert und nahezu geruchlos.

Blähungen entstehen in erster Linie durch zu lange Verweildauer des Speisebreis im Darm. Es entwickeln sich verstärkt Gär- und Fäulnisprozesse, welche zu viele Gase produzieren. Diese überdehnen den Darm, was die Darmarbeit lähmt und seine Lage sowie die anderer Organe verändert. Der ANO von Junker® entgast den Darm nach einem rein physikalischen Wirkprinzip und entlastet damit die Darmmuskulatur. Er ist ein Hilfsmittel ohne Nebenwirkungen, das die naturgemäßen Funktionen des Körpers anregt.

Der Darmpessar wird aus einem speziellen, für Medizinprodukte geeigneten, thermoplastischen Kunststoff hergestellt.

Anwendungsgebiet:


Der Darmpessar ANO von Junker® kann angewendet werden bei:

- Blähungen
- allen Erkrankungen des Verdauungsapparates und deren Folgeerscheinungen wie Darmträgheit, Reizdarm, intestinale Autointoxikation, Anämien, Leberstörungen und Geschwüre des Magen-Darm-Traktes
- allen Erkrankungen der blutbildenden und blutreinigenden Organe, des Blutzirkulationsapparates, des Immunsystems, des Stoffwechsellapparates sowie bei Folgeerscheinungen aller Darmerkrankungen

2. Wie ist der Darmpessar anzuwenden?

Der Darmpessar ANO von Junker® wird in den After eingeführt. Vor dem Einführen sollten Darmpessar und After etwas mit Vaseline, Öl oder Ringelblumensalbe eingefettet werden. Bei Hämorrhoiden den Darm ca. 2-3 cm hoch einfetten.

Einführen des Darmpessars:

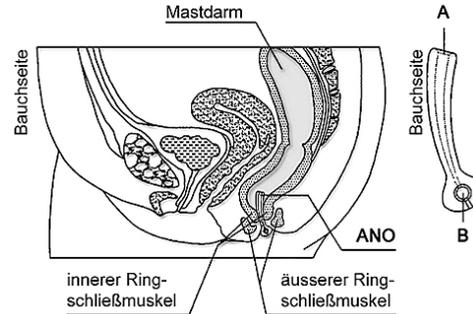

- A: Gaseintrittsöffnung. Diesen Teil einführen bis zum ovalen Knauf.
B: Gasaustrittsöffnungen im ovalen Knauf. Bei geringem Überdruck der Darmgase fließen diese durch die Öffnungen ab.

Der eingeführte Darmpessar zeigt mit der „Bauchseite“ zum Bauch, mit der „Rückenseite“ zum Rücken des Menschen. Der ovale Knauf mit der Querbohrung liegt außerhalb des Anus. Durch Zusammenkneifen des Afterschließmuskels nimmt der Darmpessar die richtige Stellung ein.

Sollte der äußerst seltene Fall eintreten, dass der Darmpessar in den Enddarm gerät und Sie sich nicht sicher sind, ob ihn die folgende Darmentleerung beinhaltet, konsultieren Sie bitte sicherheitshalber einen Arzt.

Wann sollte der Darmpessar eingesetzt werden?

Berufstätige sollten den Darmpessar abends nach dem letzten Stuhlgang einführen und morgens vor der ersten Darmentleerung herausnehmen und reinigen. Auf diese Weise verstopft er am wenigsten und die Gase können besonders zu Beginn der Therapie durch den hohen Druck verstärkt abfließen. Nichtberufstätige können den ANO von Junker® auch ganztägig tragen, da sie besser die Möglichkeit der Überprüfung und Reinigung haben. Gerade anfänglich wird der Darmpessar oft verstopft sein. Der ANO von Junker® kann prinzipiell bei allen Sportarten getragen werden, nicht jedoch beim Schwimmen.

Kinder normaler Größe sollten den Darmpessar ANO von Junker® nicht vor dem 7. Lebensjahr benutzen.

3. Wie ist der Darmpessar zu reinigen?

Die Reinigung des Darmpessars erfolgt unter fließendem warmem Wasser mit beiliegendem Pfeifenreiniger. Bitte verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich parfümfreie Seife! Nicht zu verwenden sind: Desinfektionsmittel, (alkoholhaltige) Lösungsmittel, Poliermittel, parfümhaltige Mittel, jede Form von Chlor. **Nicht kochen oder sterilisieren!**

4. Nebenwirkungen

Die Anwendung des Darmpessars ANO von Junker® ist nebenwirkungsfrei. Dies garantiert unter anderem das Material des Darmpessars, das in vielen medizinischen Produkten zum Einsatz kommt. Die Geruchsbelastigung ist nach 14-tägigem Gebrauch kaum noch wahrnehmbar.

5. Packungsinhalt und weitere Informationen

- Inhalt der Packung:** 1 Darmpessar, eingeschweißt
1 Pfeifenreiniger
1 Gebrauchsinformation

Hinweise zur Benutzung des Darmpessars:

Der gesunde Darm produziert in Darmschleim eingehüllten, nahezu geruchlosen Kot. Er schwimmt im Wasser und beschmutzt den After nicht. Bei der Benutzung des ANO von Junker® treten nach ca. 3 Tagen erste Veränderungen ein. Die Farbe des Kots wird dunkler, er schwimmt nicht und riecht nach Fäulnis, weil nun auch ältere Darminhalte abgeführt werden. Diese Auffälligkeiten der Anfangsphase sind nicht bedenklich und verschwinden nach ca. 2 Wochen. Die Blähungen gehen dann so gut wie geruchlos ab, da die Fäulnisprozesse im Darm reduziert sind. Der Kot wird heller und schwimmt im Wasser. Bei der Entnahme des Darmpessars befindet sich daran gelbliches Sekret. Dabei handelt es sich um den oben erwähnten, normalen Darmschleim.

Erfolge sind in ihrer Art unterschiedlich. Der Darmpessar ANO von Junker® bewirkt jedoch eine gründliche Darmentleerung sowie eine Verbesserung der Verdauung. Somit sammeln sich erheblich weniger schädliche Abfallstoffe im Verdauungstrakt an, was auch anderen Organen zugutekommt. Durch die stattfindende Entgiftung kann sich beispielsweise das Hautbild verbessern und störender Körpergeruch verschwinden. Der Bauch wird u.U. weicher und der Leibesumfang kann abnehmen. Hämorrhoiden können sich zumindest teilweise zurückbilden.

Eine zusätzliche Hilfe kann Ihnen das von Herrn Junker verfasste und sehr gut verständliche Buch (438 Seiten und 44 Abbildungen) sein:

„Die Verdauung – Das Fundament der Gesundheit Ihre geistigen und körperlichen Aspekte“

Es beschreibt die Zusammenhänge der Psyche mit der Verdauung und die Funktion der wichtigsten Organe. In einer fundierten Gesamtschau wird auf sachkundige und subtile Weise aufgezeigt, wie dem oft an Körper, Seele und Geist erkrankten Mensch geholfen werden kann. Reinhold Junker macht in seinem Buch verständlich, dass eine gekonnte Sanierung des Verdauungssystems eine sehr große Chance zur Heilung zahlreicher Krankheiten darstellt. Das Buch erklärt nicht nur, es ist auch Lebensbegleiter und bietet Lösungswege, um Feinheiten von Erkrankungen sowie deren Ursachen zu verstehen und ihnen auf natürlichem Weg entgegenzutreten.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.ano-von-junker.de

6. Kontaktdaten

Hersteller:

Medionic GmbH & Co. KG
Großbrösern 1
D-02627 Radibor
Tel.: 035935/21763
info@medionic.de
www.medionic.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2023.